

AFIAS

MxA/CRP

È UNA SOLUZIONE DIAGNOSTICA
che ha l'obiettivo di promuovere
un **appropriato uso degli antibiotici**

In pazienti con sintomi clinici causati da infezione, questo test aiuta nell'identificazione di
infezioni virali e/o batteriche⁽¹⁾

INFEZIONE VIRALE

MxA (proteina A di resistenza al myxovirus)
è una proteina del sangue intercellulare che attiva la resistenza cellulare contro un'ampia gamma di virus ed aumenta in presenza di infezioni virali acute.

INFEZIONE BATTERICA

CRP (in italiano CPR, proteina C-reattiva)
è una proteina ampiamente utilizzata come marcatore infiammatorio. I livelli di PCR sono elevati nelle infezioni batteriche.


AFIAS MxA/CRp: valori di riferimento




Tabella di interpretazione dei dati

MxA [ng/mL]	CRP [mg/L]	Interpretazione
MxA ≥ 15,00	CRP < 10,00	infezione virale
	10,00 ≤ CRP < 20,00	infezione virale e bassa probabilità di infezione batterica
	20,00 ≤ CRP < 100,00	probabile infezione virale e infezione batterica
	CRP ≥ 100,00	infezione virale e infezione batterica molto probabile
MxA < 15,00	10,00 ≤ CRP < 20,00	probabilità di infezione batterica
	20,00 ≤ CRP < 100,00	probabile infezione batterica
	CRP ≥ 100,00	infezione batterica molto probabile
	CRP < 10,00	non infezione



Pubblicazioni scientifiche

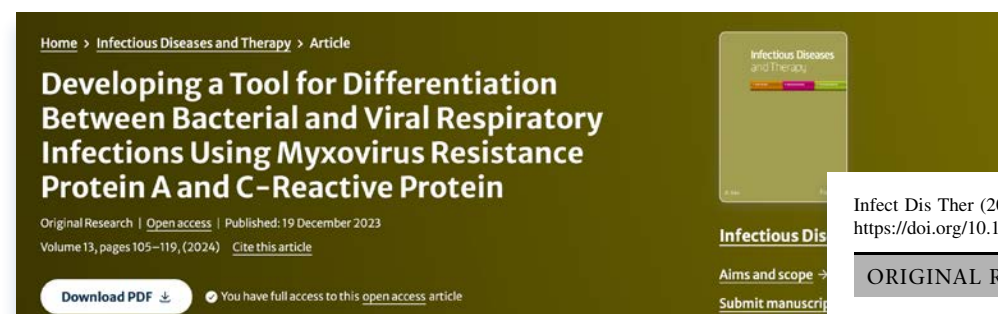

[DOWNLOAD STUDIO \(PDF\)](#)

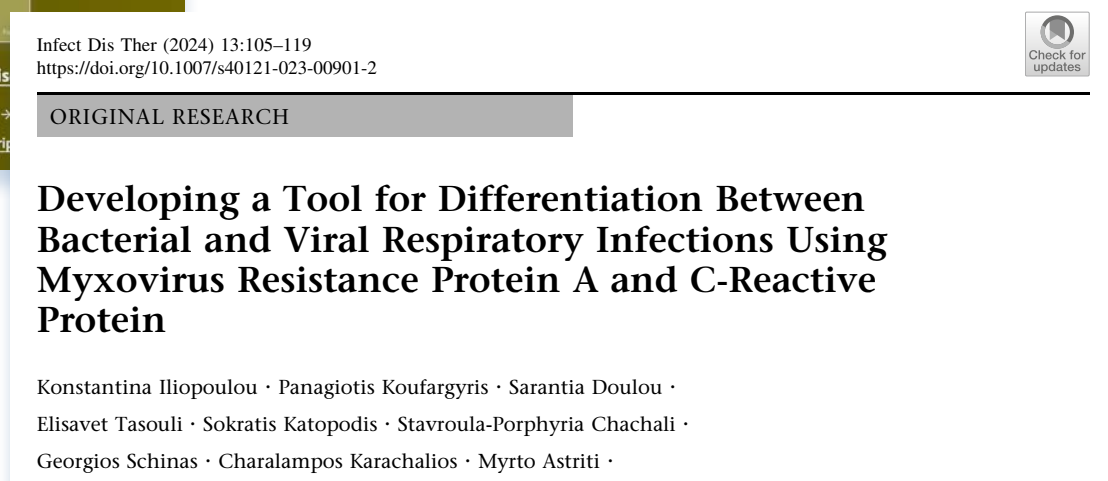

AFIAS MxA/CRp: caratteristiche del test

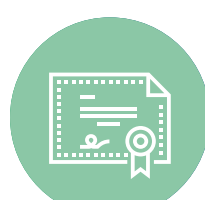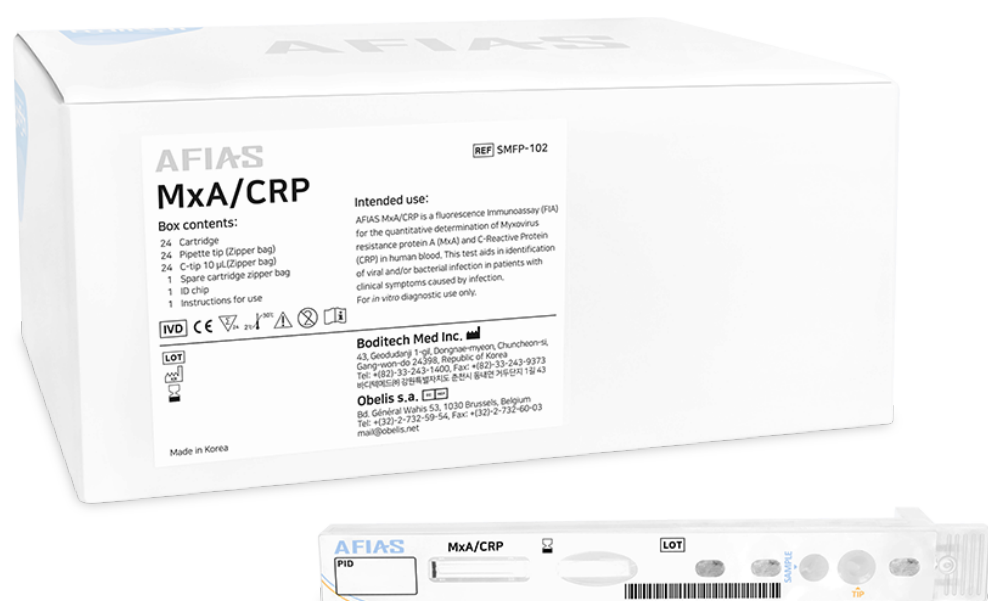

AFFIDABILE

Risultati quantitativi affidabili con elevata sensibilità.



RAPIDO E SEMPLICE

Bastano 10 µl di sangue periferico senza pipettaggio (modalità C-Tip/ digitopuntura) per avere il risultato in 12 minuti pochi minuti.



ECONOMICO

Test combo MxA/CRP che permette di risparmiare su tempo e costi ottenendo due risultati con una singola analisi.

- AFIAS MxA/CRP deve essere usato **solo in combinazione con lo strumento per test AFIAS**.
- Il test MxA / CPR è in vendita in confezioni di **24 test monouso**.

[DOWNLOAD IFU \(PDF\)](#)